

Allgemeine Warnungen zum Healy

Das Produkt darf nicht angewendet werden, wenn sich metallische Fremdkörper im Anwendungsbereich befinden, wenn Herzschrittmacher oder implantierte Defibrillatoren vorhanden sind, Blutungen, Blutungs- oder Emboliegefahr bestehen, an strahlentherapeutisch behandelten oder sensibilitätsgestörten Hautarealen gearbeitet werden muss oder wenn der Nutzer Fieber hat.

- Nicht für schwangere Frauen geeignet
- Nicht für Menschen mit Epilepsie
- Nicht für Menschen mit einem Herzschrittmacher oder einer Herzerkrankung geeignet
- Verwenden Sie keine Elektroden auf Haut, die von Schürfwunden, Ausschlägen oder Wunden betroffen ist.
- Legen Sie die Elektroden nicht auf die Augen, den Hals oder über Ihr Herz (Bereich unterhalb beider Schlüsselbeine bis zum Ende des Brustbeins und Mittellinie von der linken Axilla bis zum Ende des Brustbeins)
- Wähle einen Bereich, der frei von Haaren, Hautläsionen oder Narben, Falten in der Haut oder knöchernen Vorsprüngen ist und der sich nicht in der Nähe von metallischen Implantaten befindet.
- Nutzung ausschließlich für Erwachsene. Die Anwendung bei Kindern ist untersagt.

Sicherheitshinweise

- Bewahre dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tauche das Gerät nicht in Flüssigkeiten.
- Verwende das Gerät nicht beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Bedienen schwerer Maschinen. Die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen können unmittelbar nach der Anwendung beeinträchtigt sein.
- Lade das Gerät mit dem mitgelieferten Kabel von einer USB-Buchse mit 5 V Gleichstrom und max. 2500 mA auf.
- Im Falle eines Defekts wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Öffnen Sie keine Abdeckungen und versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren.
- Seien Sie vorsichtig, da die Kabel eine Stolper- oder Strangulierungsgefahr darstellen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart von brennbaren Gasen oder in einer mit Sauerstoff angereicherten Umgebung.
- Brechen Sie die Anwendung ab und entfernen Sie die Elektroden, wenn eine Reizung, Unbehagen, eine allergische Reaktion oder ein Brennen an den Kontaktstellen der Elektroden auftritt und kontaktieren Sie uns. Seien Sie beim Einsatz der Stimulation und bei Stromstärken von mehr als 4 mA vorsichtig.

- Achten Sie darauf, dass die Ausgangsstecker der Geräte immer zum Boden gerichtet sind. Auf diese Weise ist das Gerät vor Beschädigungen durch Wasser oder Flüssigkeiten geschützt.
- Legen Sie keine Elektroden auf die Brust, da dies zu Kammerflimmern führen kann.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet.
- Das Gerät darf nur unter den in dieser Anleitung definierten Bedingungen gelagert und transportiert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in abgeschirmten Bereichen, z.B. auf Intensivstationen in Krankenhäusern, in Flugzeugen oder überall wo die Verwendung von Mobiltelefonen untersagt ist.
- Das Gerät hat keine lebenserhaltenden Funktionen.
- Das Gerät muss mit dem mitgelieferten Zubehör betrieben werden.
- Tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen, wie z.B. Mobiltelefone, können elektrische medizinische Geräte beeinflussen. Sie sollten einen Sicherheitsabstand von 30 cm (12 Inch) zu HF-Kommunikationseinrichtungen von Teilen und Kabeln des Healy einhalten, wenn das Gerät in Gebrauch ist. Stapeln Sie es bei Verwendung nicht mit solchen Geräten und stellen Sie es nicht neben andere elektrische Geräte.
- Die gleichzeitige Verwendung von implantierten oder invasiven medizinischen Geräten (z. B. Glukosesensoren) kann durch die Verwendung des Healys beeinflusst werden. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu prüfen, ob die gleichzeitige Nutzung möglich ist.
- Vermeiden Sie Beschädigungen durch scharfe Gegenstände an den Elektrodenkabeln und den Ladekabeln. Wenn die Kabel beschädigt sind, verwenden Sie sie nicht und wenden Sie sich an den Hersteller, um Ersatz zu erhalten. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel.
- Zum Schutz des Gerätes und seiner Zubehöerteile gegen Verunreinigung und Schäden, halten Sie diese von Kindern, Staub, Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Haustieren und Ungeziefer fern.
- Verwenden Sie nur Kabel und Elektroden, die mit dem Gerät geliefert wurden. Sonstige Zubehöerteile, Kabel oder Elektroden können zu höheren Emissionen elektromagnetischer Felder oder zu einer geringeren elektromagnetischen Störfestigkeit und damit gegebenenfalls zu einem Funktionsverlust führen.
- Die Nutzung dieses Gerätes neben oder gestapelt auf anderen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu einem fehlerhaften Betrieb führen könnte.
- Verwenden Sie die Klebeelektrode nicht, wenn das Gel trocken ist oder sichtbare Schäden vorliegen oder das Anschlusskabel beschädigt ist.
- Nicht verwenden, wenn wiederkehrende Episoden von Hautreizungen auftreten.
- Das Gerät und die mit diesem Gerät verwendeten Anschlusskabel müssen sich alle in gutem Zustand befinden.

- Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, während das Gerät in Betrieb ist.
- Der Betrieb in unmittelbarer Nähe (z.B. 1 m) eines Kurzwellen- oder Mikrowellentherapiegerätes ME kann zu Instabilität im Stimulatorexgang führen.
- Die gleichzeitige Verwendung zusammen mit einem HF-Chirurgiegerät ist verboten.

Wichtiger Hinweis zur Verwendung von Klebeelektroden:

- Bringen Sie die Elektroden niemals im Bereich um die Halsschlagader an
- Platzieren Sie die Elektroden nicht auf offenen Wunden
- Vor Gebrauch den Behandlungsbereich reinigen und ggf. den Bereich rasieren.
- Reinigen und trocknen Sie die Applikationsflächen, bevor Sie die Elektrode auflegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln, da diese Hautirritationen verursachen und das Anhaften von Elektroden reduzieren können.
- Wenn Sie den Bereich mit Alkohol reinigen, stellen Sie sicher, dass er vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Elektroden anlegen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Systems, bevor Sie mit dem Vorgang beginnen.
- Verbinden Sie die Elektrode mit dem Kabel des Elektrostimulators.
- Wenn der Vorgang unterbrochen wird, überprüfen Sie die Funktion des Systems erneut, bevor Sie die Sitzung erneut beginnen.
- Entfernen Sie den Schutzfilm und kleben Sie die Elektrode auf die Hautoberfläche.
- Vor dem Einschalten des Elektrostimulators ist die Haftung der Elektrode an der Hautoberfläche zu überprüfen.

Warnungen zur Anwendung mit Klebeelektroden:

- Ein verminderter Kontakt zwischen der Haut und der Elektrode kann dazu führen, dass sich der elektrische Strom in einem Punkt konzentriert und zu Verbrennungen führt.
- Unterbrechen Sie die Behandlung, wenn es Unannehmlichkeiten oder ein Brennen gibt.
- Schalten Sie nach der Sitzung den Elektrostimulator aus, trennen Sie das Kabel von der Elektrode und entfernen Sie die Elektrode vorsichtig von der Haut, indem Sie sie an einer Ecke nach oben ziehen.
- Ein schnelles Entfernen der Elektrode kann zu Hautverletzungen führen.
- Entfernen Sie die Elektrode nicht durch Ziehen am Anschlussstück des Kabels.

- Nach Gebrauch die Elektroden auf dem Kunststoffträger neu positionieren und wieder in den Beutel legen.
- Elektroden können wiederverwendet werden: Wiederverwendung nur für dieselbe Person.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Haftung der Elektrode. Wenn die Elektroden die Haftung verlieren, reiben Sie vorsichtig ein oder zwei Tropfen Wasser auf die Geloherfläche. Dies kann die Nutzbarkeit verlängern. Wenn sich keine Verbesserung ergibt, ersetzen Sie die Elektrode durch eine Neue.
- Die Elektrode darf während des Gebrauchs nicht neu positioniert werden.
- Halten Sie die Verpackung geschlossen, um zu verhindern, dass die nicht verwendeten Elektroden dehydrieren drated.

Die folgenden Beobachtungen sind bekannt:

- Starkes Kribbeln unter den Elektroden
- Allergische Reaktion auf die Elektroden
- Hautreizung
- Schwindelgefühl
- Kopfschmerzen
- Punktförmige Wunden nach Stimulation
- Schmerzen an den Elektroden

Unwahrscheinlich auf der Grundlage vorhandener Daten:

- Vorübergehend Verlust des Sehvermögens
- Steifheit des Bewegungsapparates
- Tachykardie
- Hämatombildung an den Elektroden

Bitte beachten: Selten kann eine übermäßige Nutzung zu Befindlichkeitsstörungen führen. In diesem Fall empfehlen wir die Anwendung bis zum Abklingen zu pausieren und die erneute Anwendung mit 2 bis 3 Sitzungen pro Woche zu planen.